





HYGIENE MEDICALE

Réf : DSV/AQ-013/20

Etablie le : 22/02/2020

Version : 02

Revision :11/02/2023

## CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

- Aspect : liquide opaque
- odeur : acre
- Densité : 1.25
- pH produit pur : < 1.5
- Biodégradabilité : supérieure à 90 %.

## MODE D'EMPLOI

Dosage: selon le degré d'encrassement.

Pulvériser le produit dilué à raison de 5 à 10% sur la surface à nettoyer, étalé à l'aide d'une éponge humide, laissé agir quelques instants, puis frotter et rincer abondamment à l'eau froide ou tiède. Faire briller avec un chiffon sec propre et non pelucheux comme une microfibre.

Varié les concentrations en fonction de l'état d'encrassement des instruments et surfaces à nettoyer.

## COMPATIBILITE

**OXYCIDE AP/8 Cidex** est compatible avec la plupart des matériaux communs tels qu'acier inoxydable, polycarbonates, polyuréthanes, polysulfones, polyéthylènes, aluminium, verre, silicones, plastiques durs, élastomères.

Il n'est pas compatible avec le cuivre, le fer et le laiton. La compatibilité avec les matériaux sensibles et les alliages doit être testée avant utilisation.

## MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS

- Tous résidus chirurgicaux adhérent et séchant sur les instruments entraînent une corrosion.
- Une exposition prolongée à l'humidité endommage les instruments.
- Ne pas désinfecter, nettoyer ou stériliser ensemble les instruments fabriqués avec des matériaux différents.
- Les dispositifs présentant des signes de dégradation visibles ou fonctionnels (usures, oxydation, tâches, ... ne devront plus être renouvelés.
- Le nettoyage et rénovation des instruments doit se faire par une personne qualifiée.

## SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas avaler.
- Se rincer abondamment à l'eau claire en cas de contact les yeux ou les muqueuses. Consulter un médecin.
- Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.
- Bien ventiler après usage.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes.
- Craint le gel.

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de nettoyage ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité

## DETAFOAM PS 60 CIDEX

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42/Tél. : (212)35 64 37 60  
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59  
E-mail:lahlou.saraprocmaroc@gmail.com



HYGIENE MEDICALE

Réf : DSV/AQ-013/20

Etablie le : 22/02/2020

Version : 02

Revision :11/02/2023

## STOCKAGE

Le stockage doit être fait dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri de toute source d'ignition, à l'écart des produits incompatibles.

## DETAFOAM PS 60 CIDEX

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60  
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès - Tél. : (212)35 96 04 59  
E-mail:lahlou.saraprocmaroc@gmail.com