



Hygiène médicale

Réf : DSVA/AQ-013/20

Etablie le : 22/02/2020

Version : 02

Revision : 11/02/2023

FICHE TECHNIQUE

GERMACID DSMVA HP

DESINFECTANT PAR VOIE AERIENNE (Aérosolisation)

Désinfectant terminal des surfaces et dispositifs médicaux par voie aérienne

Élimine les bio-contaminations et préserve l'équilibre microbiologique

BIOCIDE (GROUPE 1, TP2)

(Bactéricide, Fongicide/ Levuricide, Virucide, Sporocide)

N° D'ENREGISTREMENT DMP : 12751/2020/4811-2024/DM/DPS/DMP/18

CARACTERISTIQUES

GERMACID D.S.M.V.A HP désinfectant terminal prêt à l'emploi de l'intégralité des surfaces (sol, mur, plafond), des dispositifs médicaux et de mobiliers d'une pièce par propulsion dans l'air à l'aide de pulvérisateurs automatiques (générateur mobile d'aérosol, générateur d'atomisation autonome).

GERMACID D.S.M.V.A HP Permet **la maîtrise des risques infectieux** par traitement de toutes les surfaces en contact avec l'air par saturation du local.

La désinfection par **GERMACID D.S.M.V.A HP** s'effectue hors présence humaine.

UTILISATIONS

GERMACID D.S.M.V.A HP s'utilise pour la désinfection par voie aérienne dans des contextes variés :

Désinfection préventif

Pour assurer un niveau d'hygiène optimal et prévenir les contaminations.

- à la suite d'un nettoyage approfondi ou mise à blanc.
- Avant la mise en fonctionnement d'une salle blanche neuve (nouvelle construction)
- Avant la remise en fonctionnement d'une salle blanche existante suite à un arrêt technique
- Avant une intervention de maintenance
- Après une intervention de maintenance

Désinfection curative :

Pour éradiquer une contamination microbiologique avérée.

Salles blanches :

Avant leur mise en service, après un arrêt technique, ou suite à un incident.

Blocs opératoires :

Pour garantir la propreté de ces environnements critiques

CONDITIONS D'UTILISATION

- Traiter hors présence humaine et animale.
- Couper les alimentations de gaz.
- Déconnecter les détecteurs de fumées et les cellules photoélectriques commandant l'ouverture des portes.
- Stopper les ventilations et fermer toutes les issues du local.

GERMACID DSVA HP

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlu.saraproc@gmail.com



Hygiène médicale

Réf : DSV/AQ-013/20

Etablie le : 22/02/2020

Version : 02

Revision : 11/02/2023

- Quitter le local en s'assurant du bon fonctionnement du produit et maintenir le local clos.
- Signaler le traitement à tous les accès.
- Ventiler les locaux en air neuf, pendant 1 heure minimum avant réutilisation.
- Délai de réoccupation du local à l'issue du temps de contact et de ventilation.

DOMAINE D'UTILISATION

Désinfection fréquente et prophylactique en milieu médical des surfaces, matériels et dispositifs médicaux des blocs opératoires, services de soins intensifs, salles de soins, chambres de malades, et blanchisserie.

AVANTAGES

- Désinfection préventive et curative
- Produit prêt à l'emploi
- Utilisable par diffusion
- compatibilité avec les matériaux et dispositifs médicaux
- Consommation : 6 à 8 ml/m²
- Formulé sans aldéhyde, sans phénol
- ne laisse pas de traces après séchage

MODE D'EMPLOI

Désinfection par voie aérienne

- Nettoyer la pièce
- Installer le diffuseur (générateur Mobile d'aérosol, Générateur d'atomisation autonome)
- Remplir le réservoir ou placer le bidon dans le diffuseur.
- Fermer les portes et fenêtres de la salle
- Adapter la programmation selon la surface à traiter.
- Activer le diffuseur et quitter la pièce.
- Après un temps de contact de deux heures, bien ventiler la pièce avant réutilisation.

COMPOSITION

| INGREDIENTS | N° CAS | DOSES |
|---|-----------|----------------|
| ALCOOL ETHYLIQUE 96% | 64-17-5 | 255 mg/g (v/v) |
| CHLORURE DE N- ALKYL DIDECYLDIMETHYLBENZYL AMMONIUM | 7173-61-5 | 2.5 mg/g (v/v) |
| CHLORURE DE N-ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM | 8001-54-5 | 1.5 mg/g (v/v) |
| BIS [3-AMINOPROPYL]DODECYLAMINE | 2372-82-9 | 1 mg/g (v/v) |
| CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE | 55-56-1 | 0,2 mg/g (v/v) |

GERMACID DSV A HP

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlu.saraproc@gmail.com



Hygiène médicale

Réf : DSV/AQ-013/20

Etablie le : 22/02/2020

Version : 02

Revision : 11/02/2023

SPECTRE D'ACTION MICROBIOLOGIQUES

| Activités | Normes | Actif sur | Temps de contact | Taux de reduction |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Bactéries | NM EN 1040 | Escherichia coli ATCC25922 | 10 minutes | 8 log10 |
| | NM EN 1276 | Staphylococcus aureus ATCC25923 | 10 minutes | 8 log10 |
| | NM EN 13727 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 10 minutes | 8 log10 |
| | | | | |
| Levures / Moisissures | MN EN 1275 | Candida albicans | 10 minutes | 8 log10 |
| | MN EN 1620 | Aspergillus niger | 10 minutes | 8 log10 |
| | NM EN13624 | | 10 minutes | 8 log10 |
| Sporocide | MN EN 14347 | Bacellus cereus | 30 minutes | 8 log10 |
| | NM EN13704 | | 30 minutes | 8 log10 |

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Biocide a usage exclusivement professionnel destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2)

Respecter les précautions et doses d'emploi

Se référer aux Information disponible sur la Fiche de Données de Sécurité et sur l'étiquette.

Produit à Stocker dans son emballage d'origine : de +5°C à +35°C.

STOCKAGE

Produit se conserve 24 mois dans son emballage d'origine fermé et 6 mois après ouverture de l'emballage

Température de stockage : entre 5°C à 25 °C..

CONDITIONNEMENT

Bidon 5 litres (réf : 30-1118DVA5/HM)

Bidon 10 litres (réf : 30-1118DVA10/HM)

Bidon 20 litres (réf : 30-1118DVA20/HM)

GERMACID DSV A HP

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlu.saraproc@gmail.com



Hygiène médicale

Réf : DSVA/AQ-013/20

Etablie le : 22/02/2020

Version : 02

Revision : 11/02/2023

ETIQUETTE

GERMACID DSMVA HP

**DESINFECTANT TERMINAL DES SURFACES ET DISPOSITIFS MEDICAUX PAR VOIE
AERIENNE (AEROSOLISATION)**

Biocide groupe 1 TP2

**PREVENTION ET ÉLIMINATION DES BIOCONTAMINATIONS ET PRÉSERVATION
DE L'ÉQUILIBRE MICROBIOLOGIQUE**

AUTORISATION DMP N°

DATE :

GERMACID DSVA HP

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlu.saraproc@gmail.com



CONTRE ETIQUETTE

CARACTERISTIQUES

GERMACID D.S.M.V.A HP désinfectant terminal prêt à l'emploi de l'intégralité des surfaces (sol, mur, plafond), des dispositifs médicaux et de mobiliers d'une pièce par propulsion dans l'air à l'aide de pulvérisateurs automatiques (générateur mobile d'aérosol, générateur d'atomisation autonome).
Il permet

GERMACID D.S.M.V.A HP Permet la **maîtrise des risques infectieux** par traitement de toutes les surfaces en contact avec l'air par saturation du local.
La désinfection par **GERMACID D.S.M.V.A HP** s'effectue hors présence humaine.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Traiter hors présence humaine et animale.
- Couper les alimentations de gaz.
- Déconnecter les détecteurs de fumées et les cellules photoélectriques commandant l'ouverture des portes.
- Stopper les ventilations et fermer toutes les issues du local.
- Quitter le local en s'assurant du bon fonctionnement du produit et maintenir le local clos.
- Signaler le traitement à tous les accès.
- Ventiler les locaux en air neuf, pendant 1 heure minimum avant réutilisation.
- Délai de réoccupation du local à l'issue du temps de contact et de ventilation.

DOMAINE D'UTILISATION

Désinfection fréquente et prophylactique en milieu médical des surfaces, matériels et dispositifs médicaux des blocs opératoires, services de soins intensifs, salles de soins, chambres de malades, et blanchisserie.

GERMACID D.S.M.V.A HP s'utilise en :

Désinfection préventif

- à la suite d'un nettoyage manuel (nettoyage approfondi ou mise à blanc)
- Avant la mise en fonctionnement d'une salle blanche neuve (nouvelle construction)
- Avant la remise en fonctionnement d'une salle blanche existante suite à un arrêt technique
- Avant une intervention de maintenance
- Après une intervention de maintenance

GERMACID DSV/A HP



Hygiène médicale

Réf : DSVA/AQ-013/20

Etablie le : 22/02/2020

Version : 02

Revision : 11/02/2023

Se référer aux Informations disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité et sur l'étiquette.

Produit à Stocker dans son emballage d'origine : de +5°C à +35°C.

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Généraux :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir à l'écart des étincelles et flammes nues. Ne pas fumer.

P280 Porter des gants de protection.

P284 En cas d'intervention pendant l'aérosolisation ou le temps de contact, et pour la récupération, porter un appareil respiratoire approprié.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Eliminer le produit non utilisé et son récipient comme un déchet dangereux

STOCKAGE:

produit se conserve 24 mois dans son emballage d'origine fermé et 6 mois après ouverture de l'emballage

Température de stockage : entre 5°C à 25 °C.

GERMACID DSVA HP

Dépôt : 2 avenue Melilla Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlu.saraproc@gmail.com



Hygiène médicale

Réf : DSVA/AQ-013/20

Etablie le : 22/02/2020

Version : 02

Revision : 11/02/2023

GERMACID DSVA HP

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraproc@gmail.com