



HYGIENE HOSPITALIER

Réf : DSHA/AQ-016/20

Etablie le : 22/02/2023

Version : 02

Revision : 21/02/2025

FICHE TECHNIQUE

GERMACID SHA SURFASPRAY

Nettoyant désinfectant rapide multi-surfaces mousse active prêt à l'emploi Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération tout type de surface et structures externes des équipements et des dispositifs médicaux en milieu hospitalier, médical et dentaire.

Élimine rapidement les traces d'iode et du sang

Dispositif médical de la classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée).
N° d'enregistrement DMP : 20295/2020/4812-2024/DM/DPS/DMP
Date : 11/03/2024

PRESENTATION

GERMACID SHA SURFASPRAY

Nettoyant désinfectant mousse active en spray à mousse active sans aldéhyde, destinée pour le nettoyage et la désinfection rapide par pulvérisation et par essuyage des surfaces des structures externes des équipements et des dispositifs médicaux en contact direct avec les patients et le personnel médical telles que chariots, paillasses, tables d'examen, mobilier de bloc opératoire, etc.



GERMACID SHA SURFASPRAY

Est doté d'excellentes propriétés désinfectantes, une odeur d'huile essentielle d'eucalyptus et sans traces après séchage.

LES POINTS FORTS DE GERMACID SHA SURFASPRAY

- Double action : Nettoyant désinfectant
- Désinfection rapide et à large spectre d'action antimicrobienne
- Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation.
- Utilisation manuelle avec lavette microfibre ou non tissée
- Système de pulvérisation mousse active économique
- Formulé sans EDTA et sans NTA
- Grande compatibilité avec les matériaux.
- Séchage rapide
- Mousse adhérente

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES SPECTRE D'ACTIVITÉ

Activités	Normes	Actif sur	Temps de contact	Taux de réduction (log)
Bactéries	NM EN 1040	Escherichia coli ATCC25922	5 minutes	6.30
		Staphylococcus aureus ATCC25923		7.40
		Enterococcus faecalis ATCC 29212		7.47
Levures / Moisissures	MN EN 1275	Candida albicans	5 minutes	7.36
		Aspergillus niger		7.22
Sporocide	MN EN 14347	Bacillus cereus	30 minutes	7.31

MODE D'EMPLOI

Pulvériser **GERMACID SHA SURFASPRAY** directement sur la surface ou sur une microfibre ou un non tissé, répartie le produit de manière à bien couvrir la surface à traiter environ 60 à 70 ml/m².

1. Temps de contact : 5 à 10 min.
2. essuyer à l'aide d'un support microfibre ou un non tissé propre et humide.



GERMACID SHA SURFASPRAY

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59
E-mail: lahlobusiness@hotmail.com





HYGIENE HOSPITALIER

Réf : DSHA/AQ-016/20

Etablie le : 22/02/2023

Version : 02

Revision : 21/02/2025

COMPOSITION

Ethanol, 2-propanol, Oxide de lauryl dimethyl amine, Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, Dialkyl en C8-10 diméthyl ammonium chlorures, chlorhexidine digluconate.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- ✓ Etat physique : liquide clair
- ✓ Couleur : bleu clair
- ✓ Odeur : eucalyptus
- ✓ pH : 7 à 7.5
- ✓ Densité : 0,976
- ✓ Durée de conservation: 24 mois (non ouvert) et 6 mois après ouverture

COMPATIBILITE

SURFACES	COMPATIBILITÉ
Polyéthylène	Compatible
Polypropylène	Compatible
Polytétrafluéthylène	Compatible
Silicone rubber	Compatible
Rubber	Compatible
Acrylic glass	Compatible avec restriction
Acier inoxydable	Compatible
Aluminium et alliage	Compatible
Acier	Compatible
fer et étamé	Compatible
Surfaces peintes	Compatible
Armoire	Compatible



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Dangereux-respectez les précautions d'emploi.
- Stockage : entre +5°C et +25°C.
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.
- Utiliser les biocides avec précaution.
- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux
- Usages exclusivement professionnels.
- Dispositif médical de la classe IIa
- biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4)

MESURES GENERALES DE PROTECTION ET D'HYGIENE

- Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
- Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
- Respectez les précautions d'emploi
- Utilisez les biocides avec précaution.

PROTECTION INDIVIDUELLE A DOSE D'EMPLOI

En cas de manipulation concomitante et/ou exposition simultanée à d'autres agents chimiques, ceux-ci doivent impérativement être pris en compte pour le choix des équipements de protection individuelle.

Protection respiratoire dans les conditions normales d'utilisation :

Non concerné.

Protection des mains:

Produit classé irritant pour la peau, cependant pour plus de sécurité, port des gants conseillé lors du transvasement



GERMACID SHA SURFASPRAY

Dépôt : 2 avenue Mellilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlobusiness@hotmail.com





HYGIENE HOSPITALIER

Réf : DSHA/AQ-016/20

Etablie le : 22/02/2023

Version : 02

Revision : 21/02/2025

Protection des yeux et du visage

Port des lunettes est conseillé lors du transvasement.

Protection du corps:

Non concerné à l'usage

STOCKAGE

Se conserve dans son emballage d'origine fermé entre +5°C et +25°C à l'abri de la lumière.

STABILITE

GERMACID SHA SURFASPRAY est stable dans les conditions de stockage recommandé
Flacon fermé: 2 ans à partir de la date de production indiquée sur l'étiquette et 6 mois après ouverture

Le produit **GERMACID SHA SURFASPRAY** ne doit pas être mélangé avec un autre produit
Évitée toute contamination du produit par un corps étranger ou des impuretés.



GERMACID SHA SURFASPRAY

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59
E-mail:lahloubisnesse@hotmail.com





HYGIENE HOSPITALIER

Réf : DSHA/AQ-016/20

Etablie le : 22/02/2023

Version : 02

Revision : 21/02/2025



GERMACID SHA SURFASPRAY

Dépôt : 2 avenue Melilla Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59
E-mail:lahloubisnesse@hotmail.com

