

FICHE TECHNIQUE

OXYCIDE QUICK AP/15 DVA CIDEX

DESINFECTANT POLYVALENT DE HAUT NIVEAU A FROID ECOLOGIQUE EN POUDRE EFFERVESCENTE HYDROSOLUBLE LIBERATRICE D'ACIDE PER-ACETIQUE IN-SITU

Désinfection des surfaces par voie aérienne (aérosolisation)

Désinfection des sols et surfaces

Dispositif médical de la classe IIa

N° d'autorisation DMP : 126/23/AEFL-DM/DMP/18 du 30/11/2023

PROPRIETES

OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex et La combinaison équilibrée des agents oxydant générateurs de peroxyde en synergie avec des composés auxiliaires qui déclenche la réaction de formation de l'acide per-acétique et qui favorise l'activité et l'efficacité.

C'est un désinfectant concentré puissant et écologique sous forme de poudre hydrosoluble libératrice d'acide per-acétique in-situ, il convient parfaitement et efficacement pour la désinfection des surfaces (sol, mur, plafond), surfaces externes des dispositifs médicaux et de mobiliers d'une pièce par propulsion dans l'air à l'aide de pulvérisateurs automatiques (générateur mobile d'aérosol, générateur d'atomisation autonome).

OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex Permet la maîtrise des risques infectieux par traitement de toutes les surfaces en contact avec l'air par saturation du local.

La désinfection par **OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex** s'effectue hors présence humaine des surfaces et des dispositifs médicaux par voie aérienne et la désinfection des sols, surfaces et des surfaces externes des dispositifs médicaux

AVANTAGES

- Poudre génératrice d'acide per-acétique in-situ polyvalent, Efficace et économique
- Utilisation facile et grande solubilité dans l'eau
- Désinfection préventive et curative en poudre génératrice d'acide per-acétique in-situ polyvalent
- Produit concentré faible dose d'application
- pH à dilution (0,5%) : environ 8 à 8.5
- Formulé sans aldéhyde: pas de fixation de protéines
- Formulé sans acide acétique et sans peroxyde d'hydrogène
- Sans phénomène d'accoutumance ou tolérance microbienne
- Large spectre microbien
- Biodégradable, Sans résidus toxiques et sans odeur
- Consommation : 6 à 8 ml/m2
- Compatibilité avec les matériaux et dispositifs médicaux
- Conservation de la solution désinfectante : 7 à 8 heures.
- Formulé sans aldéhyde, sans phénol
- ne laisse pas de traces après séchage
- Sans résidus toxique

DOMAINES D'APPLICATION

- Hôpitaux
- Cabinets médicaux
- Cliniques vétérinaires
- Industrie des cosmétiques
- Biotechnologies
- Transports sanitaire

OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex

Dépôt : 2 avenue Melilla Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraproc@gmail.com

COMPOSITION

Complexe oxydants générateurs de peroxyde d'hydrogène, alpha oléfine sulfonate de sodium, N, N bis [3-aminopropyl] dodecylamine, metasilicate de sodium, citrate de sodium.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

- Aspect: Poudre
- Couleur: Bleu verdâtre
- Couleur solution a 0.5% : bleu
- Odeur : Sans
- pH (solution 0.5%) : 8 a 8.5
- Densité : 1.10
- Hydrosolubilité : Soluble
- matière active : >96%

ACTIVITE ANTIMICROBIENNE

Activités	Normes	Actif sur	Temps de contact	Taux de réduction
Bactéries	NM EN 1040	Escherichia coli ATCC25922	15 minutes	>4,20 log
		Staphylococcus aureus ATCC25923		
		Enterococcus faecalis ATCC 29212		
Levures / Moisissures	NM EN 13727	Candida albicans	15 minutes	>5,35 log
	MN EN 1275	Aspergillus niger	15 minutes	> 8 log
	MN EN 1420			> 7 log
	NM EN13624			> 4,33 log
Sporocide	MN EN 14347	Bacillus cereus	30 minutes	> 7 log
	NM EN13704			> 6,3 log

UTILISATIONS

Désinfection fréquente et prophylactique en milieu médical des surfaces, matériels et dispositifs médicaux des blocs opératoires, services de soins intensifs, salles de soins, chambres de malades, et blanchisserie.

OXYCIDE AP/8 DSV A CIDEX s'utilise en :

Désinfection préventif

Pour assurer un niveau d'hygiène optimal et prévenir les contaminations à la suite d'un nettoyage manuel (nettoyage approfondi ou mise à blanc)

- Avant la mise en fonctionnement d'une salle blanche neuve (nouvelle construction)
- Avant la remise en fonctionnement d'une salle blanche existante suite à un arrêt technique
- Avant une intervention de maintenance
- Après une intervention de maintenance

Désinfection curative

A la suite d'une contamination microbiologique constatée

Pour éradiquer une contamination microbiologique avérée.

Salles blanches :

Avant leur mise en service, après un arrêt technique, ou suite à un incident.

Blocs opératoires :

Pour garantir la propreté de ces environnements critiques

MODE D'EMPLOI

1-Désinfection par voie aérienne (DVA)

- Préparer la solution désinfectante en diluant **OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex** dans l'eau froide à raison de 1% (50g par 5 litres d'eau), agité jusqu'à dissolution complète des actifs et obtention d'une solution désinfectante limpide bleuâtre.
- Nettoyer la pièce
- Installer le diffuseur (générateur Mobile d'aérosol, Générateur d'atomisation autonome)
- Remplir le réservoir ou placer le bidon dans le diffuseur.
- Fermer les portes et fenêtres de la salle
- Adapter la programmation selon la surface à traiter.
- Activer le diffuseur et quitter la pièce.
- Après un temps de contact de deux heures, bien ventiler la pièce avant réutilisation.

Les utilisateurs peuvent rejoindre la zone traitée une fois le traitement terminé. Aucun rinçage nécessaire après le traitement.

OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex

Dépôt : 2 avenue Melilla Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlu.saraproc@gmail.com

2- Désinfection des sols surfaces :

Dose d'emploi :

OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex est un produit concentré et s'utilise après dilution à raison de 0,5 à 1% selon l'activité désirée.

Mode d'emploi :

OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex s'utilise par

Pulvérisation, essuyage et balayage humide sur sols, surfaces préalablement nettoyés

- Préparer la solution désinfectante en diluant **OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex** dans l'eau froide à raison de 25 à 50 g par 5 litres d'eau, agité jusqu'à dissolution complète des actifs et obtention d'une solution désinfectante limpide bleuâtre.
- Appliqué le produit sur la surface à désinfecter à l'aide d'un chiffon, par pulvérisation ou à l'aide d'une serpillière, laisser agir 10 minutes puis essuyer à l'aide d'un chiffon humide propre.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit dangereux
- Respecter les précautions d'emploi.
- Utilisez les biocides avec précaution
- Avant toute utilisation, se référer à la fiche technique et FDS
- Ne pas mélanger avec un autre produit
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire, si l'irritation persiste, consulter un spécialiste
- Stockage entre +5°C et +30°C.

STOCKAGE

Produit se conserve 24 mois dans son emballage d'origine fermé et 6 mois après ouverture de l'emballage

- Température de stockage : entre 5°C à 30 °C.
Conservation du bain jusqu'à 8 heures selon la fréquence d'utilisation

CONDITIONNEMENT

Pot 1 kg (réf : 30-11DPV2-1/HM0112)

Seau 5 kg (réf : 30-11DG2-5/HM0112)

OXYCIDE QUICK AP/15 DVA Cidex

Dépôt : 2 avenue Melilla Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraproc@gmail.com